



MOUVEMENT
SANTÉ

Présente

En exclusivité au Québec

La chambre à oxygène hyperbare topique

Portative

Pour extrémités



La nouvelle technologie à votre portée

Pour le traitement de :

L'hypoxie

Plaies ouvertes de type II, III et IV

Ulcers profonds avec tendons et os exposés

La pierre angulaire de la thérapie Pour tout traitement de plaie

La chambre à oxygène hyperbare topique Pour extrémités

Oxygène ... le mécanisme fondamental du corps pour la guérison elle-même! Il est essentiel pour tout processus de guérison, spécialement pour les plaies ouvertes chroniques et récalcitrantes. ***L'Oxygène*** est vital à la synthèse du collagène, l'augmentation des fibroblastes, l'angiogénèse et la fonction leucocytaire.

L'oxygène hyperbare topique augmente le niveau de l'oxygène au tissu sur le site de la plaie. La première indication pour l'oxygène hyperbare topique est l'hypoxie tissulaire.

La chambre à oxygène hyperbare topique pour extrémités pousse l'oxygène hyperbare topique à différentes pressions directement au site de la plaie. Les résultats: niveau d'oxygène augmenté, plaie guérissant plus rapidement à des coûts réduits drastiquement.

Indications:

Hypoxie tissulaire incluant plaies chroniques, ulcères de peau diabétique, stases, ulcères décubitus, infections post-chirurgicales, brûlures ...

Plaies ouvertes stade II, III et IV, la chambre à oxygène hyperbare topique traite virtuellement tous les types de plaies et ulcères en plus d'être la pierre angulaire de plusieurs plans de traitement.

Ulcères profonds avec tendons et os exposés

À la fine pointe du traitement de plaie

À ne pas confondre avec les chambres hyperbares pour tout le corps, ou les sacs à oxygène hyperbare jetables et dispendieux, qui ne peuvent livrer au site de la plaie la pression intermittente et pulsatrice bénéfique. La chambre portable pour extrémités est unique.




Chaque traitement offre:

de l'oxygène diffus qui augmente la PO_2 au site de la plaie stimulant le bourgeonnement capillaire et la granulation de nouveaux tissus en santé.

augmentation de la fonction leucocytaire augmentant l'activité antibactérienne et supprimant la croissance bactérienne.

Pression intermittente stimulant la circulation et réduisant l'œdème.

Un système hermétique d'humidification essentiel au processus de guérison.

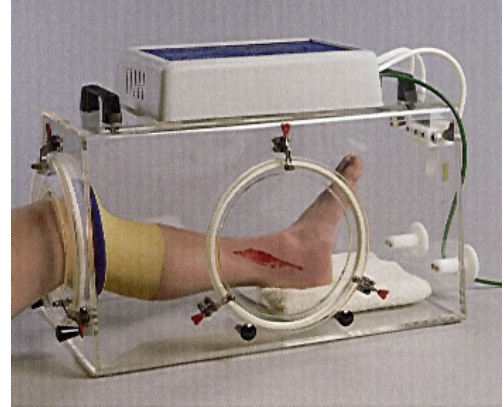

Traitement accéléré des plaies Par technologie avancée

Les avantages additionnels de la thérapie par oxygène hyperbare topique incluant le bas prix et aucune toxicité systémique à l'oxygène, et évidemment une thérapie non invasive.



Exemple de traitement

1. Premier débridement chirurgical
et début oxygène hyperbare
90 minutes/jour
29/04/97

2. Débridement chirurgical final

13/05/97

3. Arrêt des traitement

10/11/97

La thérapie par oxygène hyperbare topique est un traitement simple, sécuritaire et effectif qui a déjà sauvé plusieurs amputations de membres.

La chambre à oxygène hyperbare topique
Un design avancé
S'adaptant à plusieurs montages

Portative, légère et facile d'utilisation, la chambre hyperbare est utilisée en milieu hospitalier, centre de traitement de plaies, centre d'accueil et à la résidence



Protocole de traitement

1. Obtenir une prescription du médecin avant l'initialisation du traitement
2. Utilisez la thérapie sur une plaie propre ou suite à une débridation
3. Temps de traitement recommandé: patients hospitalisés: 3 hres/jour
à domicile 90 min. 2x/jour

Procédures

1. Faire une culture de la plaie afin de déterminer s'il y a présence de pseudomonas. Si présent, appliquer une gaze contenant ¼ à - de 1% d'acide acétique au-dessus de la plaie durant le traitement.
2. Enlever toute crème, onguent ou pansement avant l'utilisation de la chambre, sauf dans le cas de pseudomonas (voir 1.).
3. La plaie devrait être couverte après chaque traitement avec un pansement humide approprié.

Observations

Un changement défini devrait prendre place vers le 8e jour, indiqué par une plaie plus propre avec une formation de nouveaux capillaires et d'îlots de tissus granuleux. (Note: des résultats ont été observés après seulement 2 traitements)



par



**MOUVEMENT
SANTÉ**

1-888-806-0198

www.mouvementsante.com